



Checkliste für stationäre Sauerstoffkonzentratoren mit Befeuchtung

Wir möchten Ihnen nachfolgend wichtige Tipps im Umgang mit Ihrem neuen Gerät geben. Diese Empfehlungen unterstützen die Langlebigkeit und Funktionstüchtigkeit des Geräts.

Täglich

das Wasser im Befeuchtertopf wechseln und diesen nach den Angaben in der Gebrauchsanweisung reinigen bzw. desinfizieren. Das verbliebene Wasser wegschütten und frisches ggf. abgekochtes Wasser auffüllen. Achten Sie bitte auf die Minimal- und Maximalmarkierung.

Bei Bedarf wöchentlich

den Grobstaubfilter bzw. die Filterabdeckung des Geräts gemäß Gebrauchsanweisung des Herstellers austauschen bzw. reinigen.

Monatlich

die Nasenbrille wegwerfen und durch eine neue ersetzen. Bitte unbedingt beachten, dass Sie das Feuerschutzventil, »Firesafe Cannula«, nicht entsorgen, da dieses neben Ihrer Sicherheit auch als Verbindungsadapter von Sauerstoffbrille und Sauerstoffverbindungsschlauch dient.

Alle 3 Monate

den Befeuchter (Befeuchtertopf und Deckel) erneuern.

Alle 6 Monate

den Sauerstoffverbindungsschlauch wegwerfen und einen neuen verwenden. Das Feuerschutzventil, »Firesafe Cannula«, entsorgen und erneuern.

Technischer Service

ResMed Medizintechnik GmbH wird sich zur Vereinbarung eines Termins zur sicherheitstechnischen Kontrolle oder Wartung Ihres Geräts gemäß den Herstellerangaben mit Ihnen in Verbindung setzen.

Verbrauchsmaterialien

Neue Verbrauchsmaterialien können Sie telefonisch oder per E-Mail bestellen. Sie erreichen uns werktags von 8 bis 17 Uhr.

 **09193 6331-0**

 **Beatmung@ResMed.de**

Wir benötigen im Vorfeld ein Rezept über die gewünschten Materialien. Sobald uns das Rezept vorliegt, liefern wir Ihnen unverzüglich die Artikel per Lieferservice direkt nach Hause.

Folgende Artikel benötigen Sie für Ihre Therapie

- Feuerschutzventil, »Firesafe Cannula«, mit der Artikelnummer 7079246
- Zubehörset mit der Artikelnummer 7078560 mit folgenden Produkten:
 - 1 Sauerstoffverbindungsschlauch 2 Meter**
 - 1 Sauerstoffverbindungsschlauch 7,5 Meter**
 - 1 Schlauchanschlussstülle**
 - 6 Nasenbrillen**
 - 2 Schlauchverbinder**
 - 2 Befeuchtertopf**

Notdienst

Der Notdienst steht Ihnen bei technischen Störungen des Geräts rund um die Uhr unter folgender Telefonnummer zur Verfügung.

 **0800 6331000**