


myAir, mein Partner für meine Gesundheit

Durch Studien bestätigt, unterstützt myAir Benutzer:innen maßgeblich dabei, ihr PAP-Gerät länger pro Nacht zu verwenden und ihre Schlaftherapie in den ersten 90 Tagen besser einzuhalten.¹

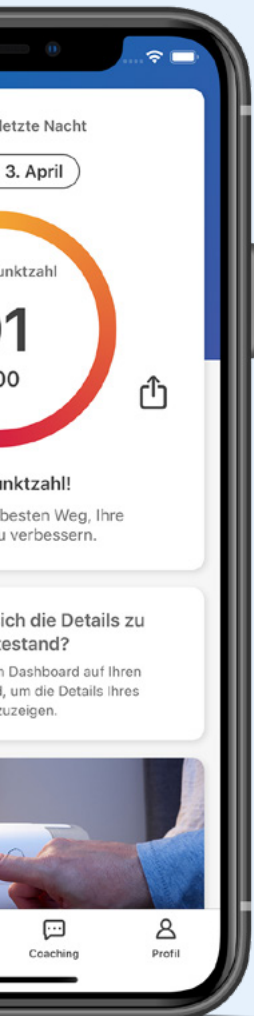

Benachrichtigungen

Die myAir-Benachrichtigungen und -Tipps helfen Ihnen dabei, Ihre Therapie-Ausrüstung besser zu verstehen und zu pflegen.



Coaching-Tipps

Erhalten Sie Zugang zu maßgeschneiderten Anleitungen, regelmäßiger Motivation, Coaching-E-Mails und praktischen Videos für eine noch komfortablere Therapie.



Erste Schritte mit myAir



Beginnen Sie Ihr myAir-Erlebnis, indem Sie die App unter i.ead.me/myair-download herunterladen oder scannen Sie den QR-Code.



Weitere Informationen zu myAir und zur Registrierung finden Sie auch unter i.ead.me/myair-info



Mehr Informationen zum Schutz der Privatsphäre finden Sie in unserem Trust Center unter i.ead.me/trust-center-privatsphaere


Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, erhalten Sie beim myAir-Support. Bei Fragen und Support zu myAir wenden Sie sich bitte an: myairsupport@resmed.de

* myAir ist auch als Web Version unter myair.resmed.eu verfügbar.

** myAir funktioniert ausschließlich mit den PAP-Geräten Air10 und Air11 von ResMed.

¹ Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A ResMed or internal sponsored study of how myAir users behave better. 2016.

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 16, 82152 Martinsried, Tel. 089 9901-00, Fax 089 9901-1055, E-Mail reception@resmed.de.
Alle genannten Marken sind registrierte Marken der ResMed Unternehmensgruppe.
© 2023 ResMed GmbH & Co.KG, Art.-Nr. 1018787/13 (auf Grundlage von 10113014r2), Obj.-ID. C181947 - 13 - 06 23

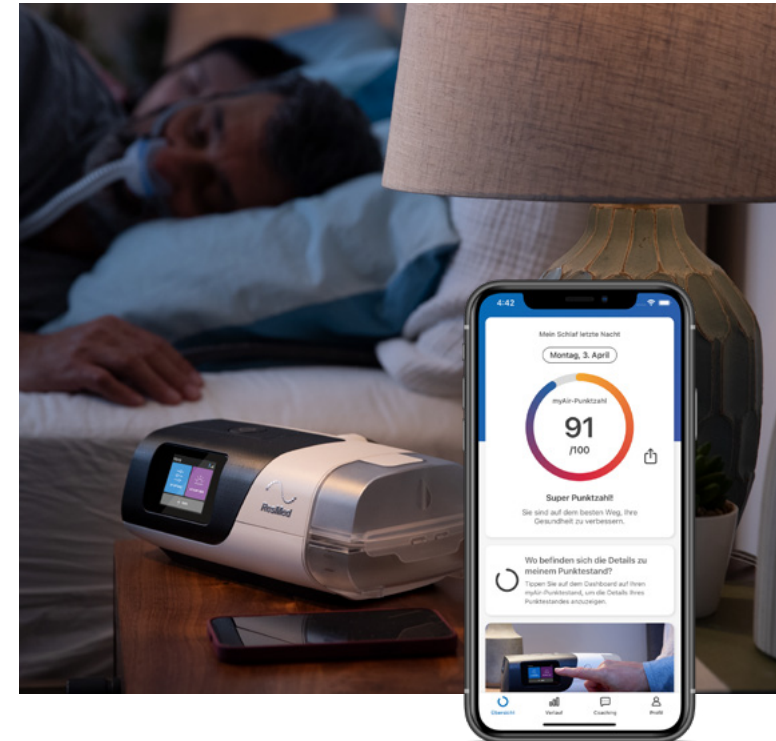

Mit myAir™ behalten Sie den Überblick über Ihre PAP-Therapie

Wäre es nicht motivierend, wenn Sie Ihre Fortschritte bei der PAP-Therapie verfolgen könnten? myAir kann Sie unterstützen, bei der Therapie am Ball zu bleiben.¹ Die App zeigt Ihnen, was gut läuft und hilft Ihnen, kleinere Probleme selbst zu beheben.

myAir, mein Coach für meine schlafmedizinische Therapie

Eine Therapie fällt leichter, wenn man die richtigen Informationen und motivierende Unterstützung bekommt. myAir ist eine kostenlose Coaching-App* für AirSense™- und AirCurve™-Geräte** von ResMed, die Ihren Therapieweg einfacher und effektiver machen kann.




Tägliche Statusanzeige

Jeden Morgen zeigt Ihnen myAir eine Punktzahl an, die sich aus der Analyse Ihrer nächtlichen Therapiedaten ergibt.



Therapieberichte


Laden Sie Therapieberichte herunter, die Ihren Fortschritt in den letzten 30/90/365 Tagen zeigen, und leiten Sie sie bei Bedarf weiter.

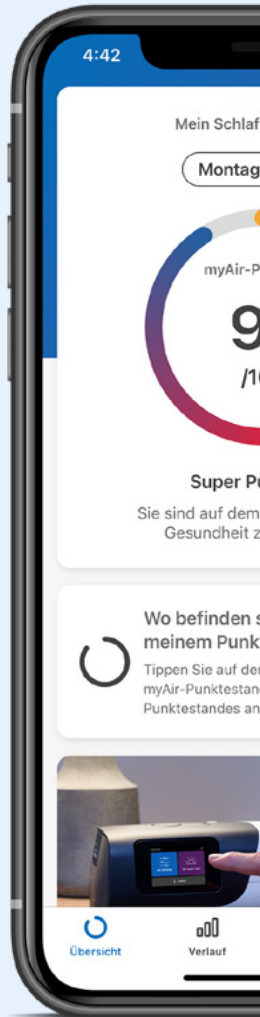

1 Die myAir-App von ResMed herunterladen

Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach „myAir“, um die App auf Ihr Smartphone herunterzuladen.


Alternativ können Sie mit Ihrer Smartphone-Kamera den QR-Code scannen.

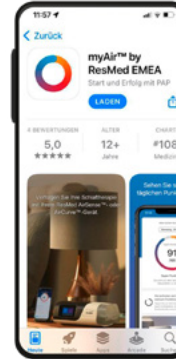

2 Anmelden oder Konto erstellen

Wenn Sie bereits ein myAir-Konto besitzen, können Sie sich direkt mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort anmelden.


Andernfalls klicken Sie auf „Konto erstellen“ und füllen die Pflichtfelder aus.

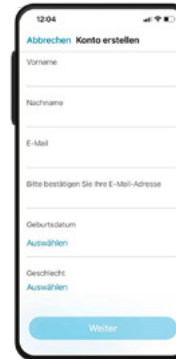

3 Ihr Konto aktivieren

Sehen Sie in Ihrem Posteingang nach: Sie sollten eine E-Mail von ResMed erhalten haben, in der Sie gebeten werden, Ihr Konto zu aktivieren. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail und befolgen Sie dann die Anweisungen zum Erstellen Ihres Passworts. (Wenn Sie die E-Mail nicht finden können, sehen Sie bitte in Ihrem Spam- oder Junk-Ordner nach.)

Merken Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort – Sie brauchen die Informationen, um eine Verbindung zur myAir-App herzustellen.

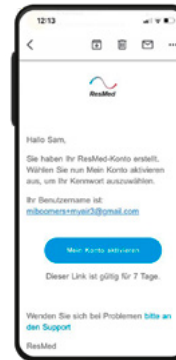

4 Zweistufige Verifizierung


Zur Erhöhung der Sicherheit nutzt myAir eine sichere, zweistufige Verifizierung. Das Prinzip ist dasselbe wie beim Online-Banking und anderen sicheren Portalen.

Um auf myAir zuzugreifen, geben Sie Ihre Anmeldedaten (Schritt 1) und danach die einmalig gültige Kennung ein, die Sie in Ihrem E-Mail-Eingang finden (Schritt 2).



5 Ihr Gerät hinzufügen

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Seriennummer und die Gerätenummer Ihres AirSense- oder AirCurve-Geräts – diese finden Sie auf der Geräterückseite – sowie Angaben zu Ihrer Maske einzutragen.

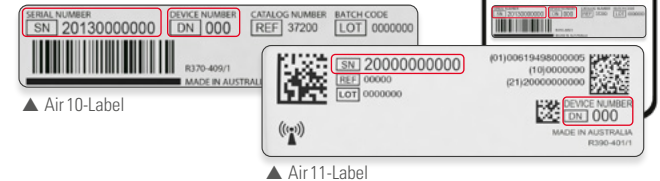

Seriennummer:

Gerätenummer:

Wenn Sie Ihr Therapiegerät gerade nicht zur Hand haben, können Sie die Registrierung später abschließen.

6 Es kann losgehen!

Herzlichen Glückwunsch – Sie sind bereit für Ihr myAir-Erlebnis! Kontrollieren Sie jeden Morgen Ihre myAir-Punktzahl, um den Fortschritt Ihrer schlafmedizinischen Therapie zu verfolgen!