



**ResMed** | Healthcare

## WILAsil-Spezialreiniger

- Geeignet für Masken, Atemschläuche und weiteres CPAP-Zubehör
- Hygienische und materialschonende Reinigung
- Ergiebige Dosierung (2 ml Reinigungskonzentrat auf 1l Wasser)
- Angenehmer Zitrusduft



**WILAsil-Spezialreiniger, 250 ml**

Art.-Nr. 7079868

## Spezialreinigungsbürste

- Für eine gründliche Reinigung Ihres CPAP-Schlauchs

**Spezialreinigungsbürste für SlimLine-Schlauch (15 mm)**

Art.-Nr. 7079478

**Spezialreinigungsbürste für Standard-Schlauch (19 mm)**

Art.-Nr. 7079477



## ResMed Reinigungstücher

- Natürliches Reinigungstuch aus Baumwolle
- Parfümfrei, alkohol- und latexfrei
- Einzeln verpackte Tücher ideal für die Reise



**Reinigungstücher 62 Stück (Spenderbox)**

Art.-Nr. 61918

**Reinigungstücher 14 Stück einzeln verpackt**

Art.-Nr. 61919

Auch online erhältlich unter **ResMedShop.de**

**Vertrieb durch:** ResMed GmbH & Co. KG, Mahatma-Gandhi-Platz 3, 81248 München, Tel. 089 9901-0, Fax 089 9901-1055, E-Mail kontakt@resmed.de  
© 2024 ResMed GmbH & Co. KG, **Art.-Nr. 1017411/12**, Obj.-ID. C147611 - 12 - 06 24



**ResMed** | Healthcare



# Reinigung & Pflege

## Tipps für Maske und Zubehör

ResMed-Healthcare.de



Die Reinigung & Pflege beeinflusst die Funktionsfähigkeit, den Komfort und die Lebensdauer Ihres Maskensystems.

### Achtung!

- **Keine** aromatischen Lösungen oder Duftöle, Bleichmittel, Alkohol oder stark riechende Produkte verwenden.
- **Keine** rückfettenden Reinigungsmittel verwenden.
- Die Teile **nicht im Geschirrspüler** reinigen und **nicht bei direkter Sonneneinstrahlung** oder **auf der Heizung** trocknen, dies könnte zu Beschädigungen führen.



### Tipps

- Die Maskenreinigung sollte zu einem täglichen Ritual werden – wie das Zähneputzen.
- Am besten die Maske morgens reinigen, damit am Abend wieder alle Teile trocken sind. Restfeuchtigkeit zwischen den beiden Membranen des Maskenkissens kann bei Bedarf mit einem Wattestäbchen entfernt werden.
- Vor dem erstmaligen Gebrauch die komplette Maske mit klarem Wasser spülen und abtrocknen.



## Reinigung

Täglich/nach jedem Gebrauch:

**Maske entsprechend der beiliegenden Anleitung zerlegen.**

- Für eine optimale Abdichtung der Maske muss Hautfeuchtigkeit und -fett nach jedem Gebrauch vom Maskenkissen entfernt werden.
- Die Maskenteile (ohne Kopfband) mit Spezialreiniger oder mit warmem Wasser (ca. 30° C) und neutralem Reinigungsmittel (z. B. Flüssigseife) reinigen.
- Luftauslassöffnungen mit einer weichen Bürste reinigen.
- Alle Teile unter fließendem Wasser gründlich abspülen und an der Luft trocknen lassen.
- Die vollständig getrockneten Teile entsprechend der Anweisung wieder zusammenbauen.
- Den Atemschlauch am Griffprofil der Manschette vom Gerät abziehen und bis zum nächsten Gebrauch an einem sauberen, trockenen Ort aufhängen (z. B. hängend über der Duschwand).



### Wöchentlich

- Das **Kopfband** nur per Hand waschen. **Nicht bügeln!** Wenn das Kopfband neu ist, kann es während der ersten Wäsche zu Farbauswaschungen kommen.
- Den Atemschlauch mit dem Spezialreiniger (gemäß Anleitung) oder mit warmem Wasser (ca. 30° C) und einem milden Reinigungsmittel reinigen, ggf. Reinigungsbürste verwenden, gut abspülen und hängend trocknen lassen (z. B. hängend über der Duschwand).



### Monatlich

- Das Gehäuse des Atemtherapiegerätes mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.
- Den **Luftfilter** überprüfen und bei Bedarf gemäß der Anleitung austauschen. Der Luftfilter ist **nicht waschbar!**

